

Abwurfbox mit patentiertem Sicherheitsverschluss zu jeder Packung Pen-Nadeln.



Bestellinformation

	Produkt	Packungsgröße	Bestellnummer
	KLINION® soft fine® plus 0,23 mm [32G] x 5 mm	100 + 10 Stück	5064 PZN 9076312
	KLINION® soft fine® plus 0,25 mm [31G] x 6 mm	100 + 10 Stück	5060 PZN 9166245
	KLINION® soft fine® plus 0,25 mm [31G] x 8 mm	100 + 10 Stück	5061 PZN 9166251
	KLINION® soft fine® plus 0,33 mm [29G] x 10 mm	100 + 10 Stück	5062 PZN 9166268
	KLINION® soft fine® plus 0,33 mm [29G] x 12 mm	100 + 10 Stück	5063 PZN 9166274

Vertrieb | eu-medical GmbH
 Bärensteiner Str. 27-29 | D-01277 Dresden
 info@eu-medical.de | www.eu-medical.de
Gebührenfreie Rufnummer 0800-5 88 80 56


EU Vertreter

Medeco BV | Alexander Flemingstraat 2 | NL-3261 MA Oud-Beijerland | www.medeco.nl

Hersteller: Medexel Co., Ltd. | 536-65, Geumgwang-Ri,
 Geumgwang-Myeon, Ansong-Si, Gyeonggi-Do, Korea



soft fine®
plus

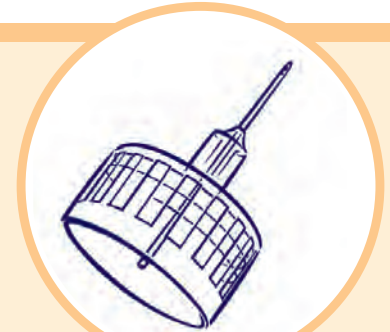

Pen-Nadeln

NEU
 AB SOFORT AUCH
 IN 5 MM LÄNGE

Geprüftes
Qualitätsprodukt

...mit dem
"plus" an Nadeln,
Komfort & Sicherheit

- 100 + 10
- 5 Nadellängen
- Sicherheitsabwurfbox



Erhältlich in 5 Nadellängen und 3 Nadelstärken:

Hier ist für jeden die passende Nadel dabei.


0,23 mm 32G x 5 mm	0,33 mm 29G x 10 mm
0,25 mm 31G x 6 mm	0,33 mm 29G x 12 mm
0,25 mm 31G x 8 mm	

Eine sichere Insulininjektion ist gewährleistet durch die richtige Kombination aus Nadellänge und Injektionstechnik.

Empfohlene Nadellänge

Einstich ohne Hautfalte, senkrecht oder schräg:	
Kinder und Jugendliche	
sehr schlank	5 + 6 mm
normalgewichtig	5 + 6 mm
übergewichtig (BMI>25)	6 + 8 mm
Erwachsene	
sehr schlank	5 + 6 mm
normalgewichtig	6 + 8 mm
übergewichtig (BMI>25)	8 + 10 mm
Einstich mit Hautfalte, senkrecht oder schräg:	
Kinder und Jugendliche	
sehr schlank	5 + 6 mm
normalgewichtig	6 + 8 mm
übergewichtig (BMI>25)	8 + 10 mm
Erwachsene	
sehr schlank	6 + 8 mm
normalgewichtig	8 + 10 mm
übergewichtig (BMI>25)	8 + 10 + 12 mm

Achtung: Pen-Nadeln sind Einmalprodukte ②

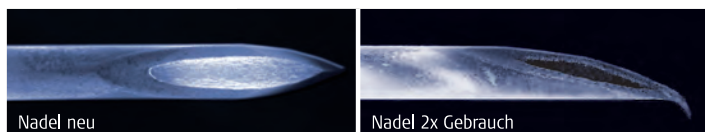

Durch den Gebrauch kann sich die Nadel verformen und ist nicht mehr steril.

Passen auf alle gängigen Insulinpens:

AUTOPEN 24 (Owen-Mumford)

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/1



Autopen 24 für Aventis Insulin 3/2



BERLIPEN (Berlin-Chemie)

BerliPen areo



BerliPen areo 2



BerliPen Precision



BerliPen junior



CLIKSTAR (sanofi-aventis)

ClikStar



DIAPEN (Haselmeier)

DiaPen



HUMAPEN (Lilly)

HumaPen Luxura



HumaPen HD



HumaPen Memoir



NOVOPEN (Novo Nordisk)

NovoPen Junior



NovoPen 4



NovoPen Echo



OPTIPEN (sanofi-aventis)

OptiPen Pro 1



OptiPen Pro 2



TACTIPEN (sanofi-aventis)

TactiPen



YPSOPEN (Ypsomed)

YPSOPEN



und alle Fertigpens